



FICHA TÉCNICA

Láminas de Fotocurado Dokuz

Material fotopolimerizable para cubetas individuales

Distribuidor Autorizado: M&M; Spa

RUT: 78.085.872-9 | Contacto: +56 9 2979 6499

■ Presentación Comercial

- Envase con 50 cubetas superiores
- Envase con 50 cubetas inferiores
- Modelos preformados transparentes

■ Descripción del Producto

Las Láminas de Fotocurado Dokuz son resinas fotopolimerizables transparentes en forma de placas preformadas superiores e inferiores, diseñadas para la confección de cubetas individuales de impresión, cubetas funcionales en prótesis total, trabajos de coronas y puentes, así como bases para modelos de dentadura.

Material listo para usar, sin molestias olfativas y con agradable sabor a menta. Permite amplio tiempo de trabajo bajo luz ambiente y polimeriza rápidamente con luz ultravioleta o halógena.

■ Características Técnicas

- Alta transparencia para modelado preciso
- Excelente estabilidad dimensional
- Fácil adaptación sobre modelo de yeso
- Polimerización rápida
- Uso inmediato posterior al curado
- Superficie lisa y uniforme
- Buena resistencia mecánica

■ Modo de Aplicación

1. Dejar el material a temperatura ambiente.
2. Marcar el contorno en el modelo de yeso.
3. Aislar el modelo si es necesario.

4. Retirar hoja protectora y adaptar la lámina.
5. Moldear y recortar bordes.
6. Polimerizar 3 a 5 minutos según espesor (Light Box, halógena o UV).
7. Eliminar capa inhibida con alcohol si fuese necesario.

La cubeta queda lista para uso inmediato.

■ **Conservación**

- Almacenar en lugar fresco y protegido de la luz.

■ ■ **Precauciones**

- Exposición insuficiente puede afectar estabilidad.
- Contiene BHT.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a sus componentes.